


INSTRUKTIONER


PROVTAGNINGSKITTET INNEHÅLLER:




INSTRUKTIONER

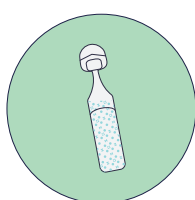


AMPULL MED
SALTLÖSNING
STERIL NaCl 0,9%

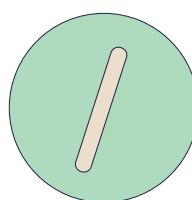


TUNGSPATEL

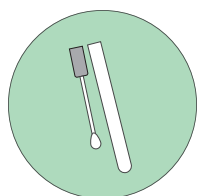

PROVRÖR MED
PROVTAGNINGSPINNE

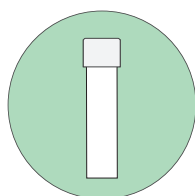

SALIVPROVRÖR

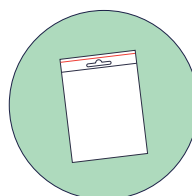

ZIPPÅSE



CE-MÄRKT
SJÄLVPROV-
TAGNINGSKIT



PCR-ANALYS I
KVALITETSSÄKRAT
LABORATORIUM



RESULTAT

PRESTANDA
Resultat av valideringsstudie.

Sensitivitet: 95,7 %

Specificitet: 99,1 %

Säkerhet: 97,8 %



Dynamic Code AB
Fridtunagatan 24
582 13 Linköping

Denna bruksanvisning
är omarbetad och
utfärdad 2021-06-09

Självprovtagningsskit
för *in vitro*-diagnostik
COVID-19
Pågående infektion

Hej! Det här är Dynamic Codes självprovtagningsskit för covid-19. Provtagningen tar bara några minuter att genomföra och skickas sedan till vårt laboratorium för analys. Din vårdgivare återkopplar sedan till dig när provsvaret är klart. Du får svar på om ditt prov innehåller SARS-CoV-2.

→ **Tips!** Om du inte har tillgång till spegel och/eller bra belysning kan du vid svalgprovtagningen använda din mobiltelefon som en spegel genom att filma dig själv med framkameran, eller som belysning genom att använda mobilens fotolampa.

Provet ska tas direkt när provtagningsmaterialet har öppnats. Om provtagningsmaterialet är skadat ska det ej användas. Kontakta då din vårdgivare för ett nytt självprovtagningsskit. **Provsvaret är endast giltigt om provet tagits på rätt sätt i enlighet med instruktionerna.** Kittet ska vara rumstempererat vid provtagningsstillfället. Rekommenderas från 13 år. För barn 6–12 år bör provtagning utföras av vårdnadshavare eller sjukvårdspersonal. För barn 1–5 år bör provtagning utföras av sjukvårdspersonal.

FÖRBEREDELSE



1. LÄS IGENOM INSTRUKTIONERNA


Börja med att rengöra händerna med handsprit.

Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar testet, så att du inte missar något viktigt.




2. KONTROLLERA UPPGIFTERNA

Ta fram provröret med provtagningspinnen och kontrollera att dina personuppgifter är korrekta på etiketten.

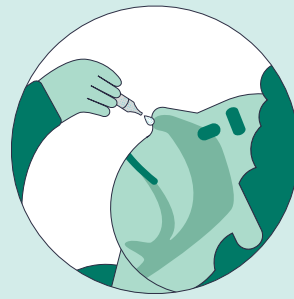

3. SKÖLJ NÄSAN MED SALTÖSNING


a) Om du är snorig, snyt dig först.
b) Vrid av förslutningen i toppen på ampullen med saltlösning. Luta huvudet bakåt och droppa ungefär hälften av lösningen i ena näsborren. Droppa resten i andra näsborren. Låt verka en kort stund (10–15 sekunder) och låt sedan lösningen passera svalget genom att svälja.

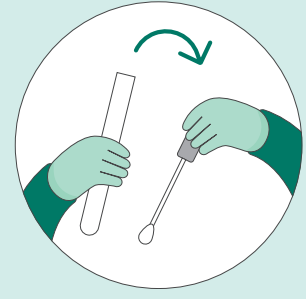

4. FÖRBERED FÖR SVALGPROVTAGNING


a) Ta fram provröret med provtagningspinnen.
b) Se till att du har en spegel eller mobiltelefon med kamera för att kunna se ner i svalget.
c) Vrid upp korken på provröret och tänk på att inte vidröra den mjuka delen på provtagningspinnen.

PROVTAGNING

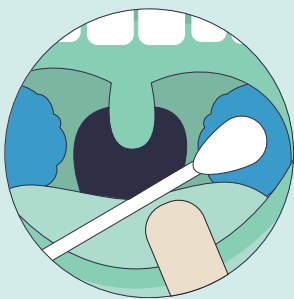

5. TA PROV FRÅN HALSMANDLARNÄ OCH SVALGVÄGGEN

a) Titta i spegeln. Luta huvudet något bakåt och öppna munnen stort för att få en tydlig bild av halsmandlarna.
b) Använd spateln för att hålla tungan borta från den bakre delen av munnen.
c) Gnugga med provtagningspinnen på halsmandlarna på båda sidor i halsen i 5–7 sekunder. Försök undvika att vidröra andra delar av munnen. Om du har opererat bort halsmandlarna,

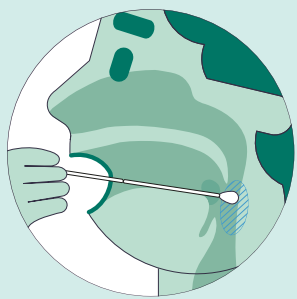


gnugga då motsvarande på båda sidor om svalget.
d) För nu pinnen förbi halsmandlarna, ända fram till svalgväggen. Skrapa och gnugga provtagningspinnen mot slemhinnan i 5–7 sekunder. Kräkreflex betyder att du är på rätt plats.
e) Fortsätt till steg 6 utan att lägga ner pinnen.



6. TA PROV FRÅN NÄSAN


a) För upp den mjuka delen av provtagningspinnen 2–3 centimeter i ena näsborren och rotera den mot näsväggen i 5–7 sekunder.
b) Upprepa provtagningen på samma sätt i andra näsborren.
c) Fortsätt till steg 7 utan att lägga ner pinnen.

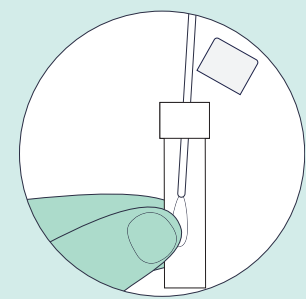

7. DOPPA I SALIV


a) Ta fram salivprovröret och öppna locket.
b) Spotta 2–3 gånger i salivprovröret.
c) Doppa provtagningspinnen i salivet och rotera ett par varv.
d) Släng salivprovröret.
e) Fortsätt till steg 8 utan att lägga ner pinnen.

INLÄMNING

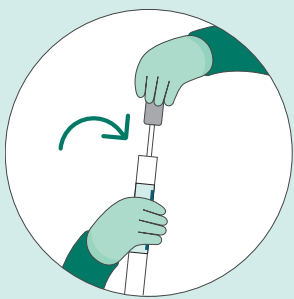


8. SÄTT PÅ KORKEN

Stoppa tillbaka provtagningspinnen direkt i provröret och tryck fast korken ordentligt.

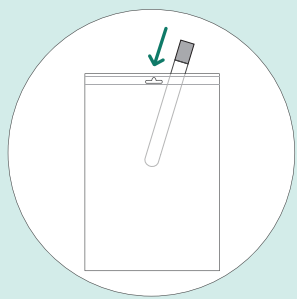

9. PACKA PROVET

Lägg provröret med provtagningspinnen i zippåsen och förslut.

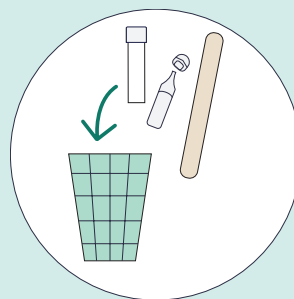

10. SLÄNG ÖVRIGT MATERIAL

Ta med dig salivprovröret, spateln och saltlösningsampullen och släng i dina vanliga hushållssopor. Dessa ska inte lämnas in med provet.



11. LÄMNA IN OCH INVÄNTA SVAR

Lämna provet till personalen på provtagningsplatsen. Du får provsvaret via 1177.se så snart det är analyserat och klart.

Om du skadar dig på provtagningsmaterialet alternativt upplever biverkningar efter att ha tagit vårt test, kontakta support@dynamiccode.com