


دستور العمل


کیت نمونه برداری شامل موارد زیر است:




دستور العمل

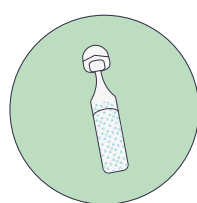


لوله حاوی محلول آب نمک

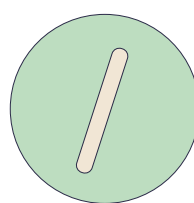


چوب باریک یا
آبسلانگ زبان

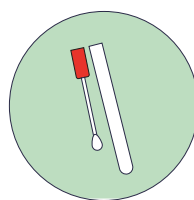

گوش پاک کن نمونه برداری

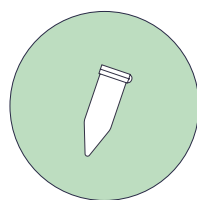

کیسه زیپ دار

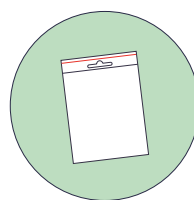

لوله آزمایش مخصوص
بزاق/آب دهان



Dynamic Code AB
Fridtunagatan 24
582 13 Linköping


این دستور العمل در تاریخ 12-02-2021
بازبینی و صادر شده است.

سلام! این کیت نمونه برداری DYNAMIC CODES توسط خود فرد برای بیماری کووید 19 است. نمونه برداری فقط چند دقیقه طول می کشد و سپس برای تحلیل به آزمایشگاه ما فرستاده می شود. درمانگر شما زمانی که جواب آزمایش آماده باشد به شما خبر می دهد. راهنمایی! در صورتی که دسترسی به آینه و/ یا نور خوب ندارید می توانید در نمونه برداری از حلق از دوربین جلوی موبایل خود به عنوان آینه استفاده کنید و یا از چراغ عکسبرداری دوربین برای انداختن نور استفاده کنید.




1. مطالعه دقیق دستورالعمل

اول دست هایتان را با مایع ضد عفونی کننده تمیز کنید. قبل از شروع نمونه برداری تمامی دستورالعمل را با دقت بخوانید تا مورد مهمی را فراموش نکنید.

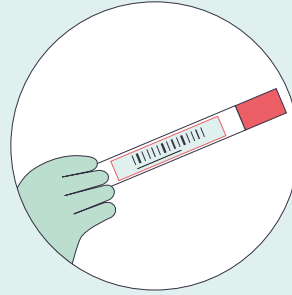


2. بررسی اطلاعات شخصی

لوله آزمایش و گوش پاک کن را بردارید و دقت کنید که اطلاعات شخصی شما بر روی برجسب درست باشد.

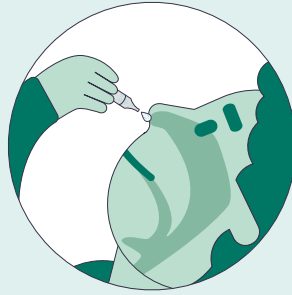

3. شستشوی بینی با محلول آب نمک

الف) اگر آبریزش بینی دارید، اول آب بینی خود را بگیرید.
ب) درپوش محلول آب نمک را بچرخانید و باز کنید. سر خود را به عقب خم کنید و تقریباً نصف آن محلول را در یکی از سوراخ های بینی بچکانید. بقیه آن را در سوراخ دیگر بینی بریزید. برای مدت کوتاهی (10 تا 15 ثانیه) بگذارید و سپس اجازه دهید محلول با بلعیدن از حلق عبور کند.

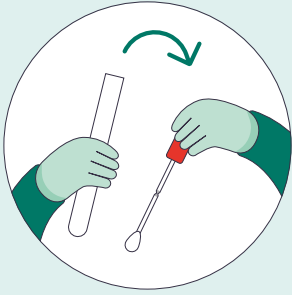


4. آماده شدن برای نمونه برداری از حلق

الف) لوله آزمایش را با گوش پاک کن بردارید. الف) از یک آینه و یا دوربین موبایل برای دیدن ته حلق خود استفاده کنید.
ج) درپوش لوله آزمایش را بردارید و دقت کنید که قسمت نرم گوش پاک کن را به جایی نزنید.




5. نمونه برداری از لوزه ها و دیواره حلق

الف) در آینه نگاه کنید. سر را به عقب خم کنید و دهان خود را کاملاً باز کنید تا لوزه ها را به درستی ببینید.
ب) از جوب باریک برای نگهداری زبان از قسمت عقب دهان استفاده کنید.
ج) گوش پاک کن را به لوزه های هر دو طرف حدود 5 تا 7 ثانیه بمالید. سعی کنید گوش پاک کن به قسمت های دیگر دهان مالیده نشود.

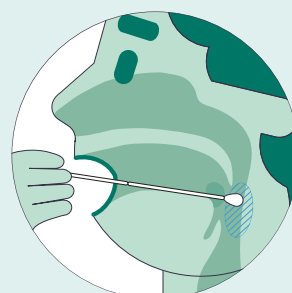


6. نمونه برداری از بینی

الف) قسمت نرم گوش پاک کن را حدود 2 تا 3 سانتی متر در یکی از سوراخ های بینی فرو کنید و آن را حدود 5 تا 7 ثانیه در ته بینی بمالید.
ب) نمونه برداری را به همین طریق از سوراخ دیگر بینی ادامه دهید.
ج) بدون زمین گذاشتن گوش پاک کن نمونه برداری را تا مرحله 7 ادامه دهید.

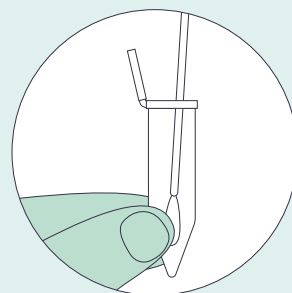


7. فرو کردن در آب دهان یا بزاق

الف) لوله آزمایش مخصوص آب دهان را بردارید. ب) 2 تا 3 مرتبه در داخل لوله آزمایش مخصوص آب دهان نف کنید.
ج) گوش پاک کن را در داخل بزاق فرو کنید و چند بار در داخل آن بچرخانید.
لوله آزمایش مخصوص آب دهان را دور بیندازید. ه) بدون اینکه گوش پاک کن را زمین بگذارید تا مرحله 8 ادامه دهید.

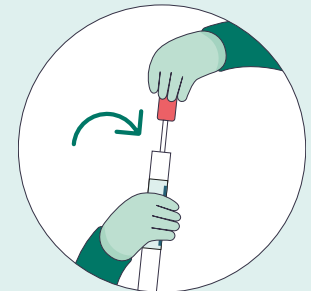


8. گذاشتن درپوش لوله

گوش پاک کن را مستقیماً داخل لوله آزمایش فرو کنید و درپوش آن را با دقت ببندید.

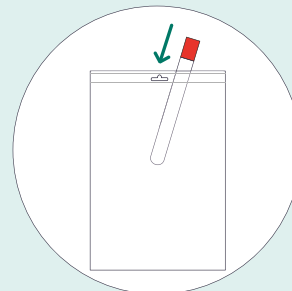

9. بسته بندی نمونه آزمایش

لوله آزمایش را همراه با گوش پاک کن در داخل کیسه زیپ دار بگذارید و آن را ببندید.

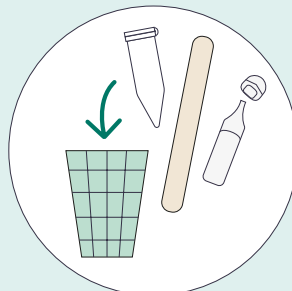

10. دور ریختن بقیه وسایل نمونه برداری

لوله آزمایش بزاق/آب دهان، جوب باریک یا آسپلانگ و ظرف محلول آب نمک را بردارید و در زباله های معمولی خانگی بیندازید. این وسایل نباید به همراه کیسه حاوی نمونه تحویل داده شوند.



11. تحویل نمونه ها و منتظر ماندن برای دریافت پاسخ

نمونه را در آزمایشگاه به کارکنان تحویل دهید. شما به محض آماده شدن تحلیل ها می توانید نتیجه آزمایش خود را از طریق وبسایت WWW.1177.SE ببینید.